



## ORIENTAÇÕES - SOLUÇÃO CONTROLE HEMOGLOBINÔMETRO HEMO CONTROL

Prezados,

Vocês estão recebendo a solução controle (controle de qualidade interno) do equipamento hemoglobinômetro hemo control.

O kit (caixa) é composto por dois frascos contendo um controle com nível normal (valores normais de hemoglobina) e outro com nível alto (valores altos de hemoglobina).

Segue algumas informações importantes sobre o seu manuseio:

- Foi enviado um kit (caixa) de solução controle para cada equipamento enviado ao seu município;
- Os controles devem ser mantidos em geladeira, de 2 a 8°C;
- Após sua abertura, devem ser utilizados por até 30 dias (sugere-se inserir na caixa a sua data de abertura para controle);
- A realização do controle deve ser semanal;
- Ambos os controles devem ser testados semanalmente;
- Para realização do teste, retirar a solução controle da geladeira, aguardar em torno de 5 minutos em temperatura ambiente, homogeneizar suavemente por inversão e proceder o teste;
- Lembre-se de comparar o resultado obtido no equipamento com a faixa que consta na embalagem do controle, em caso de desvios, consultar a seção 3.4.3 do manual;
- Enviamos também uma planilha em excel que pode ser utilizado pelo seu serviço para registro das informações do controle (sugerimos utilizar formato eletrônico para validações e gráficos, disponível para download no site do HEMOSC);
- Para maiores informações, consultar a seção 3.4 do manual de orientações. No site do HEMOSC, no link <https://www.hemosc.org.br/projeto-dengue.html>, consta um vídeo demonstrando como realizar o teste com a solução controle;